



Følgende rengjøringsmetoder anbefales for KardiaMobile og KardiaMobile 6L produktene:

1. Rengjør KardiaMobile ved å tørke spraye rengjøringsmiddel, for eksempel mildt såpevann, på en myk klut og tørk deretter enheten grundig av med denne myke og fuktete klut.
2. La enheten tørke godt før bruk.

OBS - Vær meget forsiktig med alle alkoholbaserte produkter. Våtservietter eller annen alkoholbaserte rengjøringsprodukter er ofte meget våte og for mye væske kan ha innvirkning på produktets ytelse.

Ikke dypp enheten eller i væske.