



Følgende rengjøringsmetoder anbefales for KardiaMobile og KardiaMobile 6L produktene:

- Tørk av med et egnet rengjøringsmiddel på en myk lofri klut, slik som for eksempel;
 - a. Mildt såpevann
 - b. Desinfeksjonsmiddel slikt som Virkon eller tilsvarende
 - i. Anbefales grunnet COVID-19 og er anbefalt av CDC:
<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html>

- La enheten tørke godt før bruk.

- Ikke benytt alkoholbaserte vaskeprodukter.

- Ikke legg enheten i noen som helst form for væske.